


Otkoračite od tvrdoglavih plantarnih bradavica

Revolucionarna metoda liječenja bradavica
s mikrovalnom tehnologijom z mikrovalovno tehnologijo.
Primjeri uspješnog liječenja iz Slovenije.




KAKO DJELUJU MIKROVALOVI?

Mikrovalna energija brzo povećava temperaturu tkiva i precizno djeluje samo na stanice u lokaliziranom području.

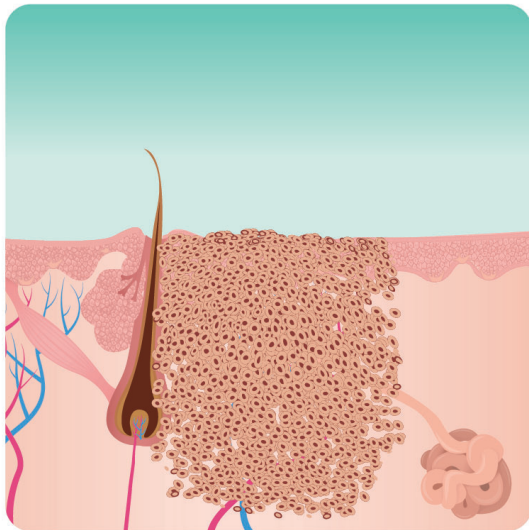


Slika 1

Zaraženo tkivo može biti nekoliko milimetara ispod površine i često ga je teško liječiti uobičajenim metodama, zbog čega tkivo ili nije izliječeno ili dolazi do većih oštećenja.

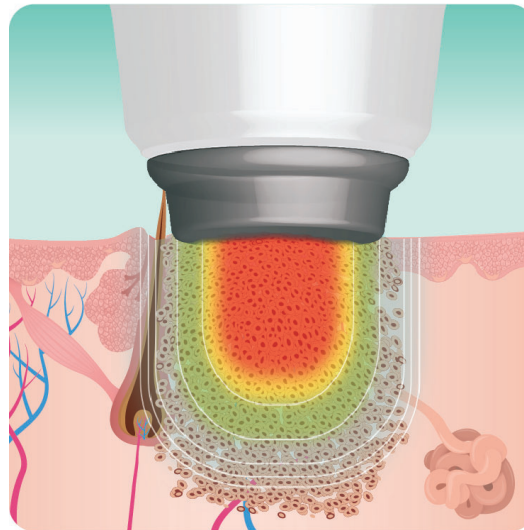

Slika 2

Swift osigurava precizno i točno kontroliranu dozu energije. Kada se mikrovalovi dovode u tkivo, molekuli vode počinju sudarati jedni s drugima i stvarati lokaliziranu toplinsku energiju.

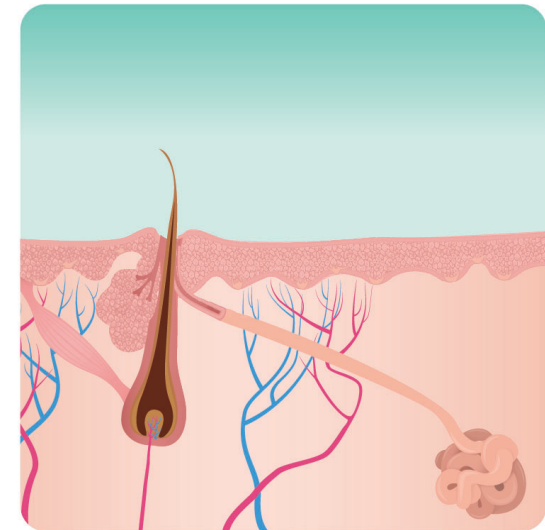

Slika 3

Liječenje završava za samo nekoliko sekundi i odmah započinje kaskada ozdravljenja. Obradeno tkivo se brzo zamjenjuje, popravljajući i regenerira.

GLAVNE PREDNOSTI

Kraći vrijeme liječenja:

Mikrovalovi uzrokuju brzo zagrijavanje unutar tkiva, što omogućuje kraće vrijeme liječenja uz minimalnu bol.

Jednostavna uporaba:

Jednostavna i ponovljiva metoda liječenja bez upotrebe anestetika.

Bez dima i opeklin:

Tijekom mikrovalnog liječenja ne stvara se dim ili para, stoga nema povezanih zdravstvenih rizika s tim.

Potpuno prenosivo i lako pohranjivanje:


Sustav za liječenje Swift je lagan i kompaktan, te zauzima malo prostora.

Vrhovni aplikatora za jednokratnu upotrebu:


Dizajn aplikatora Swift uključuje vrh za jednokratnu upotrebu, što eliminuje potrebu za sterilizacijom i smanjuje rizik od unakrsne kontaminacije.




bez
opeklin

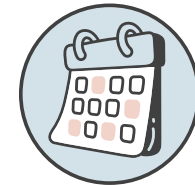

potrebna su
3-4 posjete

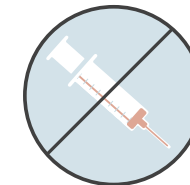

bez
anestetika

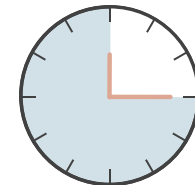

postupak
traje 15 minuta



Fanči Ljubljana, Slovenija

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA



PRVI POSJET

NAKON PRVE TERAPIJE
(1 mjesec nakon prve terapije)

NAKON DRUGE TERAPIJE
(1 mjesec nakon druge terapije)

NAKON TREĆE TERAPIJE
(3 mjeseca nakon treće terapije)

Starost pacijenta:
20 godina

Prije liječenja, bradavice su se pojavljivale:
8 godina

Broj obavljenih terapija:
3 Swift terapije

- Nakon tri uzastopne terapije razdoblje čekanja na odgovor liječenja.
- 3 mjeseca nakon posljednje terapije, uočeno je značajno poboljšanje.

“Brzo, učinkovito i bez komplikacija.” A. S.

Fanči Ljubljana, Slovenija

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA



PRVI POSJET



NAKON PRVE TERAPIJE
(1 mjesec nakon prve terapije)



NAKON DRUGE TERAPIJE
(1 mjesec nakon druge terapije)



NAKON ČETVIRTE TERAPIJE
(9 mjeseci nakon četvrte terapije)

Starost pacijenta:
33 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
Od 2017 godine. Prethodno 5 tretmana s tekućim
dušikom. Neuspješno. Bradavice su se uvijek
ponovo pojavile.

Broj obavljenih terapija:
4 Swift terapije

- Nakon četiri uzastopne terapije razdoblje čekanja na odgovor liječenja.
- 9 mjeseci nakon posljednje terapije, bradavica je nestala.

“Odlično! Preporučujem svakome. Prije sam više puta pokušavala s tekućim dušikom, ali su se uvijek ponovo pojavile. Ova terapija je u usporedbi s dušikom neusporedivo bolja i zasigurno manje bolna.” **L. H.**

Fanči Ljubljana, Slovenija

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA



PRVI POSJET

Starost pacijenta:
40 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
Prije liječenja, bradavice su se pojavljivale: Prva bradavica pojavila se 2019 godine. Tretman s keratoliticima bio je isprva uspješan, ali su se bradavice ponovno pojavile, čak i u većem broju. Pokušaj uklanjanja laserom 6 terapija, neuspješno.

Broj obavljenih terapija:
3 Swift terapije



NAKON PRVE TERAPIJE

(1 mjesec nakon prve terapije)



NAKON DRUGE TERAPIJE

(1 mjesec nakon druge terapije)



NAKON POSLJEDNJE TERAPIJE

(3 mjeseca nakon treće terapije)

- Nakon tri uzastopne terapije razdoblje čekanja na odgovor liječenja.
- 3 mjeseca nakon posljednje terapije, uočeno je značajno poboljšanje.

“Apsolutno preporučujem svakome tko ima ovakve probleme. Sam tretman je bolan, ali traje samo nekoliko sekundi. Nakon terapije, bila sam potpuno bez bolova.” **N. T. P.**

Fanči Ljubljana, Slovenija

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA



PRVI POSJET



NAKON ČETVRTE TERAPIJE

(2 mjeseca nakon posljednje terapije)

Starost pacijenta:
30 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
Bradavica prisutna 3 godine. Pojavila se nakon trudnoće. Prije Swift terapije, pokušaji uklanjanja s tekućim dušikom, kiselinom i krioterapijom.

Broj obavljenih terapija:
4 Swift terapije


- Nakon četiri uzastopne terapije razdoblje čekanja na odgovor liječenja..
- Bradavica je potpuno nestala.

“Terapija nije bolna. Čak ni prije nisam osjećala bol. Prethodne terapije bile su neuspješne, jer se bradavica povećavala. Tijekom SWIFT terapije nisam primijetila promjene, ali je dva mjeseca nakon posljednje terapije potpuno nestala.” K. P.

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA

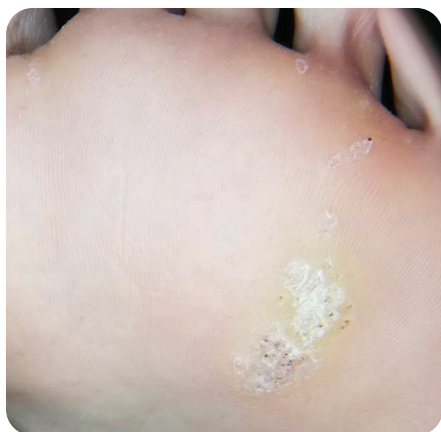

PRVI POSJET

NAKON ČETVIRTE TERAPIJE (4 mjeseca nakon druge terapije)

NAKON ŠESTE TERAPIJE (posljednja obrada, završetak)

NAKON SEDME TERAPIJE

Starost pacijenta:
30 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
3 godine. Prethodno 10 puta krioterapija i
4 puta tretman s kiselinama.

Broj obavljenih terapija:
7 Swift terapija. Prekid terapija zbog trudnoće.

- Dugotrajnija terapija, gdje isprva nije bilo vidljivog poboljšanja, stanje se isprva poslabšalo.
- Nakon duže pauze, uočena su poboljšanja. Bradavice su potpuno nestale.

“Terapija se osjeća kao peckanje, oštar ubod. Na malim bradavicama je osjećaj sličan onome kod krioterapije, samo što je ovaj kratkotrajni i brže prestaje.” Š. A.


Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA



PRVI POSJET

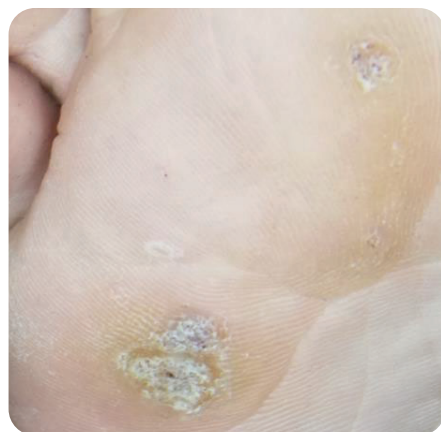

NAKON ČETVIRTE TERAPIJE
(4 mjeseca nakon druge terapije)



NAKON PETE TERAPIJE
(posljednja obrada, završetak)



NAKON POSLJEDNJE
TERAPIJE

Starost pacijenta:
24 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
Najmanje 2 godine. Prethodni tretmani: 5 mjeseci
s Acetocautinom, 3 mjeseca s kiselinom i 1 put
s krioterapijom.


Broj obavljenih terapija:
6 Swift terapija

- Poboljšanje stanja bolovi tijekom aktivnosti.
- Bradavice su potpuno nestale 6 mjeseci nakon posljednje terapije.

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA

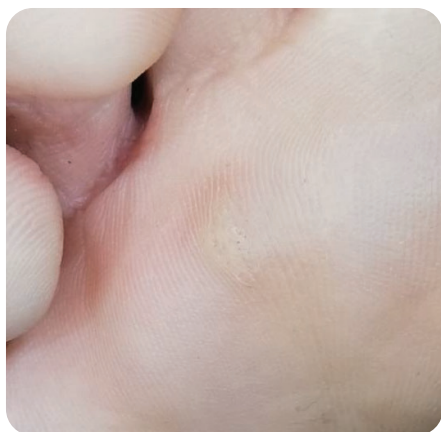


PRVI POSJET



NAKON DRUGE TERAPIJE
(1 mjesec nakon prve terapije)



NAKON DRUGE TERAPIJE
(posljednja obrada, završetak)

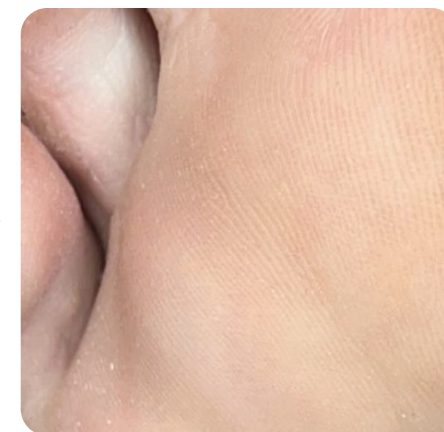

NAKON POSLJEDNJE
TERAPIJE

Starost pacijenta:
22 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
1,5 godina. Prethodni tretmani: 5 tjedana
s Acetocastinom, 2 tjedna s kremom Spirularin.

Broj obavljenih terapija:
3 Swift terapije

- Bradavice su potpuno nestale 1 mjesec nakon posljednje terapije.
- Za 2-3 mjeseca nakon posljednje terapije nestale su i druge, manje bradavice na tom stopalu, koje nisu bile tretirane.

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA



PRVI POSJET



NAKON ŠESTE TERAPIJE
(posljednja obrada, završetak)



NAKON POSLJEDNJE
TERAPIJE

Starost pacijenta:
23 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
4 godine. Prethodni tretmani: 6 mjeseci s Acetocaustinom,
2 godine krioterapije i redovno uklanjanje keratoze.

Broj obavljenih terapija:
7 Swift terapija

- Bradavice su potpuno nestale.

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA



PRVI POSJET

Starost pacijenta:
20 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
1 godina. Prethodna upotreba nepoznatog jekarničkog
proizvoda 1 mjesec. 3 mjeseca s Acetocaustinom.

Broj obavljenih terapija:
4 Swift terapije



NAKON PRVE TERAPIJE
(1 mjesec nakon prve terapije)



NAKON ČETVRTE TERAPIJE
(posljednja obrada, završetak)



NAKON POSLJEDNJE
TERAPIJE
(2 mjeseca nakon posljednje terapije)

- Poboljšanje stanja bolovi tijekom aktivnosti.
- Bradavice su potpuno nestale 2 mjeseca nakon posljednje terapije.

“Terapiju osjećam kao vruće ubode. S svakom terapijom osjećaj je bio intenzivniji. Lasersko uklanjanje dlaka boli više od Swifta.” **K. A. M.**

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA




PRVI POSJET

Starost pacijenta:
42 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
2,5 godine. U prošlosti je već imala bradavice
koje je uklonila s Acetocautinom ili laserom.

Broj obavljenih terapija:
4 Swift terapije

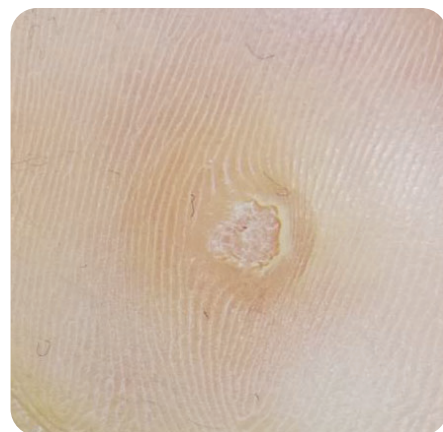


NAKON PRVE TERAPIJE
(1 mjesec nakon prve terapije)



NAKON TREĆE TERAPIJE
(posljednja obrada, završetak)

- Poboljšanje stanja bolovi tijekom aktivnosti već nakon druge terapije.
- Bradavica je potpuno nestala 5 mjeseci nakon posljednje terapije.

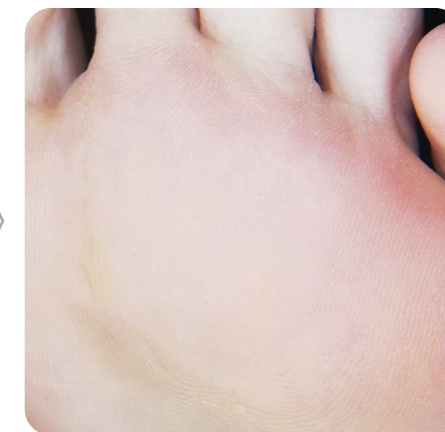

NAKON POSLJEDNJE
TERAPIJE
(5 mjeseci nakon posljednje
terapije)

“Terapiju osjećam kao toplo peckanje. Koža se brzo zagrije, a toplina odmah nestaje. U usporedbi s laserom, ubod boli je kraći, pauze su ugodnije, a postupak je brži.” **A. K.**

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA




PRVI POSJET

Starost pacijenta:
48 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
5 godina. Prethodni tretmani s krioterapijom
i laserom. Neuspješno.

Broj obavljenih terapija:
3 Swift terapije

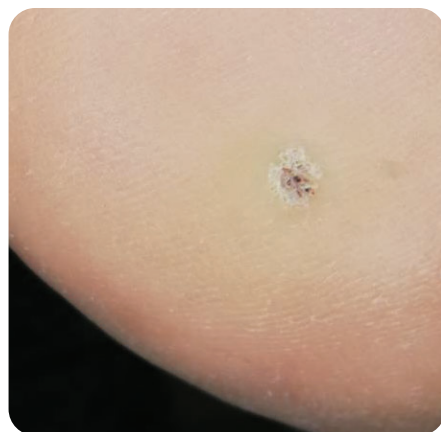

NAKON PRVE TERAPIJE
(1 mjesec nakon prve terapije)



NAKON DRUGE TERAPIJE
(posljednja obrada, završetak)



NAKON POSLJEDNJE
TERAPIJE
(1 mjesec nakon posljednje
terapije)

- Bradavica je potpuno nestala
1 mjesec nakon posljednje terapije.

“Terapiju osjećam kao bolnu toplinu. Bol se pojačavala s pulsima i tijekom pojedinačnih seansi. Bol je neusporedivo blaža u odnosu na bol pri laserskom uklanjanju bradavica.” **A. P.**

Liječenje bradavica

Korištena metoda za liječenje bradavica:
Swift mikrovalna terapija

TIJEK LIJEČENJA



PRVI POSJET

PO PRVI TERAPIJI
(4 tedne po prvi terapiji)

PO DRUGI TERAPIJI
(4 tedne po drugi terapiji)

TREKUTNO STANJE
(4 tedne po zadnji terapiji)

Starost pacijenta:
35 godina

Prije liječenja bradavice su se pojavljivale:
3 godine. Prethodni tretmani s krioterapijom 5 mjeseci
i 6 mjeseci s galenskim proizvodom i tekućinom za bradavice.

Broj obavljenih terapija:
3 Swift terapije

- Potpuno poboljšanje stanja.
- Bradavica je nestala.

Za dodatne informacije obiščite www.swift.zate.si

